



Облучатель бактерицидный Roal ОБУ-02-30

Руководство по эксплуатации



Предупреждение

Эксплуатируйте аппарат в строгом соответствии с указанными здесь инструкциями. Пользователю необходимо полностью уяснить все их детали. Перед началом работы с аппаратом следует внимательно прочитать данное Руководство.

При вмешательстве в работу аппарата возможны сбои в его работе и даже риск нанесения травмы оператору. В этом случае компания-производитель не несёт никакой ответственности за неизбежные последствия.

Комплектация оборудования: две лампы.

Технические характеристики:

Модель	ОБУ-02-30
Мощность, Вт	30 Вт
Напряжение, В	220/110
Длина волны, Нм	253
Размеры без упаковки, мм	480x60x245
Размеры в упаковке, мм	520x370x570
Вес без упаковки, кг	1,3
Площадь действия, кв. м.	5-45

Производитель оставляет за собой право менять габаритные размеры оборудования в диапазоне +/- 10 мм

Сфера применения: облучатель для уничтожения бактерий, используется в школах, больницах, театрах, станциях и других местах с большим потоком людей.

Этот продукт использует напряжение тока AC220V / 50HZ или AC110V / 60HZ, и требует, чтобы провод заземления был установлен правильно.

Сильные ультрафиолетовые лучи вызывают ожоги глаз и кожи людей, при непосредственной близости к людям. Прибор для стерилизации и дезинфекции рекомендуется использовать, когда человек покинул помещение, при этом нужно установить яркую вывеску, о том, что идет дезинфекция.

В настоящее время в общих больницах и школах все больше людей использует облучатели, чтобы стерилизовать и дезинфицировать после выхода из помещения.

Не должно быть никаких препятствий в четырех углах при проведении внутренней дезинфекции, и ламповая трубка должна регулярно вычищаться.

Установочное пространство ультрафиолетовой стерилизационной лампы должно быть пустым там, где есть воздушный поток людей, при использовании в замкнутых пространствах выключите ультрафиолетовую лампу перед входом проветрите двери и окна, чтобы исключить накопление озонного газа.

Предостережение:

-Эта стерилизационная лампа не должна использоваться в помещениях с горючим газом или взрывоопасным порошком.

-Эта стерилизационная лампа не подходит для гаражей, ферм и подобных мест.

- Стерилизационная лампа устанавливается в таком месте, к которому не могут прикасаться дети.

При потере шнура питания в случае повреждения он должен быть возвращен на завод специалисту или для ремонта.

- Эта лампа излучает сильный ультрафиолетовый свет, который способен травмировать человеческую кожу и глаза.

Дополнительные сведения о товаре:

Изготовитель: Guangzhou Royal SYT Trading Co, Ltd Китай

Продавец, импортёр: ООО «Торговый дом Пищевые технологии»,

Юр. адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 14

Фактический адрес: 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1

Перечень авторизованных сервисных центров компании ООО «Торговый дом Пищевые технологии»:

Город	Адрес	Телефон, электр. почта
г. Краснодар	ул. Ростовское шоссе, 68/1	тел. +7 (988) 594-86-06 service@zavod-pt.ru
г. Симферополь	ул. Героев Сталинграда, 8/3	тел. (978)747-7285 krim@zavod-pt.ru
г. Нижний Новгород	ул. Ванеева, д.3	тел. +7 (831) 424-20-15, nn@zavod-pt.ru
г. Воронеж	ул. Электросигнальная, 24	тел. +7 (473) 232-36-06 vobs@zavod- pt.ru

По вопросам технического обслуживания, претензий по качеству за консультацией обращаться по адресу: ООО «Торговый дом Пищевые технологии», 350010, г. Краснодар, ул. Ростовское шоссе, 68/1, т./ф.: (861) 228-9831, (861) 241-17-00