

Стерилизатор гласперленовый
модель 9008

Руководство по эксплуатации
Только для профессионального использования!

Прежде чем приступить к работе, внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Назначение:	Стерилизатор гласперленовый предназначен для оперативной обработки рабочей поверхности инструментов и аксессуаров (щипчики, ножницы, пинцет и пр.) путем кратковременного погружения последних в среду нагретых до высокой температуры мелких стеклянных шариков. Обеззараживает инструменты и обеспечивает безопасность рабочего процесса.
Описание:	Компактный, высокоэффективный прибор. Конструкция прибора обеспечивает удобство и безопасность использования. Дополнительная комплектация: гласперленовые шарики
Технические характеристики:	<ul style="list-style-type: none">➤ Размеры: 16x16x18 см;➤ Напряжение 220-240 В; 50 Гц;➤ Температура среды стерилизации 200-250 °С.
Порядок эксплуатации:	<ol style="list-style-type: none">1. Подключите прибор к электросети. Поместите гласперленовые шарики в емкость, закройте крышку.2. Переверните кнопку включения прибора, расположенную спереди, в положение «I», загорится индикатор нагрева. Через 10-15 минут температура среды стерилизации достигнет максимума.3. Откройте крышку, аккуратно поместите металлическую часть инструмента или аксессуара в шарики. Не погружайте пластиковые и деревянные части инструментов! Внимание! Будьте осторожны! Высокая температура!4. Время стерилизации 20-30 секунд.5. Переверните кнопку в положение «O», осторожно выньте инструменты.
Меры предосторожности:	<ul style="list-style-type: none">➤ Убедитесь, что напряжение сети соответствует напряжению питания стерилизатора. В противном случае может произойти замыкание.➤ Устанавливайте аппарат только на твердую, ровную и устойчивую поверхность.➤ Не подвергайте аппарат воздействию высокой температуры. Не храните и не используйте в местах с повышенной влажностью. Не помещайте в воду или какую-либо другую жидкость. Если прибор упал в воду или намок, не прикасайтесь к воде и устройству – немедленно отключите от электросети.➤ Запрещается использование аппарата в случае появления механических повреждений, нарушения изоляции шнура питания. Запрещается открывать корпус подключенного к электросети прибора.➤ Не оставляйте работающий аппарат без присмотра. Запрещается использовать и хранить аппарат в месте, доступном для детей.➤ Не используйте абразивные моющие средства для очистки прибора во избежание его повреждения➤ Не извлекайте инструменты из подключенного к сети стерилизатора.➤ Используйте прибор строго по назначению.➤ Данный прибор не предназначен для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими или умственными способностями, обладающими недостаточным опытом за исключением тех случаев, когда они находятся под присмотром и получают инструкции по использованию прибора от лица, ответственного за их безопасность.➤ Хранить прибор в недоступном для детей мест

Внимание! Высокое напряжение! Разбирать прибор категорически запрещается. При нарушении данного условия гарантия аннулируется. В случае поломки обращайтесь по месту покупки прибора.

Произведено: Китай (Ningbo Meinuo Electrical Appliance Technology Co., LTD. Адресс: Китай, No. 588, South Area, Yangshan Village, Ditang Street, Yuyao citi, Ningbo, Zhejiang, China.)

Импортер: ООО «Экосистем» (г. Москва, Фрунзенская наб., 16/1, офис 44)

Товар сертифицирован