

SMAS-ЛИФТИНГ MICROSON HIFU

Что такое MICROSON

Высокоинтенсивная сфокусированная ультразвуковая система Microson представляет собой неинвазивную технологию лифтинга на уровне SMAS. Насадки различной глубины, позволяют детально обработать область от слоя SMAS внутри кожи до верхней дермы.

Microson - аппарат ультразвукового SMAS-лифтинга с персонализацией и насадками различной глубины, позволяет подобрать параметры индивидуально по разным типам старения: мелкоморщинистым, деформационным, усталым, мускульным, смешанным.

Принцип работы

Технология HIFU - High Intensity Focused Ultrasound переводится как Высоко Интенсивный Фокусированный Ультразвук.

Это метод локального воздействия ультразвуком на SMAS-слой.

С помощью аппарата Microson проводится избирательный точечный нагрев до 65-75°C участка мышечно-апоневротического слоя, что вызывает термокоагуляцию клеток на регулируемой глубине. После воздействия происходит сокращение растянутого коллагена, с дальнейшим формированием соединительной ткани, обеспечивающей подтяжку лица.

Лечение осуществляется без повреждения кожных покровов, окружающих здоровые ткани и органы.

Процедура SMAS-лифтинга безопасна, ее можно проводить неограниченное количество раз.

Максимальный эффект от процедуры достигается от 2х до 6 месяцев. Продолжительность эффекта составляет 1,5-2 года в зависимости от индивидуальных особенностей пациента.

Уникальность технологии MICROSON

- Новый уровень персонализации технологии SMAS-лифтинга позволяет индивидуально подбирать параметры для каждого пациента. Благодаря двум режимам работы: с ПЖК и белковыми структурами, а также универсальному режиму специалист клиники может решить любую задачу пациента.
- Жировая прослойка нижней трети лица плохо поддерживается мышечной структурой. Под действием гравитации она перемещается вниз, образуя брыли, второй подбородок, птоз и малярные мешки. Для работы с такой проблемой есть отдельный режим, который воздействует только на жировые пакеты, компактизирует лицо и создает эффект 3D-лифтинга.
- У мелкоморщинистого типа лица возрастные изменения обусловлены снижением синтеза коллагена. Здесь на помощь приходит режим работы с белковыми структурами. Он позволяет стимулировать синтез коллагена, разгладить морщины, вернуть упругость кожи, при этом сохранив жировые прослойки, без риска получить сухое, изможденное лицо.
- Уникальный запатентованный усеченный картридж 1.5 мм дает возможность провести безоперационную подтяжку век (аналог блефаропластики). Работа с веками проходит с защитой зрения у пациентов с синдромом сухого глаза.

Выгоды для бизнеса

- Быстрая окупаемость аппарата.
- Самая выгодная себестоимость линии на рынке РФ.
- Картриджи аппарата рассчитаны на 20 000 линий, что на порядок выше, чем у известных аналогов.
- Низкие медицинские риски за счет предустановленных параметров, которые позволяют работать специалистам, исключая всевозможные осложнения.
- Возможность подключения УЗИ сканера Clarius L20 HD3, который идеально подходит для множества клинических ситуаций, требующих поверхностной визуализации на глубине до 4 см.

Показания к применению

- ✓ Безоперационная подтяжка лица (эффект пластической операции)

- ✓ Лифтинг век без риска фиброза
- ✓ Устранение птоза, брылей
- ✓ Уменьшение второго подбородка
- ✓ Коррекция нависшего века
- ✓ Устранение асимметрии лица
- ✓ Коррекция малярных мешков
- ✓ Разглаживание носогубных складок и кисетных морщин
- ✓ Лифтинг бровей с эффектом «лисьи глазки»
- ✓ Терапия гиперпигментации

5 видов картриджей

В комплекте:

- картридж 1.5 мм - Воздействует на поверхность дермы в верхней, средней и нижней третях лица, шеи и декольте.

- картридж 3.0 мм - Воздействует на глубокие слои дермы, укрепляет септы и поддерживающие связки.

- картридж 4.5 мм - Стимулирует уровень SMAS, формируя каркас для тканей.

Опционально:

- картридж 1.5 мм (усеченный) - Уникальный запатентованный картридж для работы с веками и анатомически труднодоступными зонами.

- картридж 13 мм - Разрушает жировые клетки адипоциты.

Технические характеристики MICROSON

Вид энергии: Высокоинтенсивный фокусированный ультразвук.

Ассортимент картриджей: SM4-4.5 / DD7-3.0 / SD7-1.5 / SD7-1.5N / SC4-13. В комплекте - 3 для лица.

Опционально - 1 для тела / 1 для век.

Ресурс картриджа: 20100 линий

Длина линий: 12/24 мм

Выходная частота: 4 МГц/ 7 МГц

Экран: 10.2 дюйма, LCD Touch Screen.

Источник питания: Переменный ток 220-240 В, 50/60 Гц

Потребляемая мощность: 150 ВА

Вес: 26 кг (нетто)

Размеры (ШхГхВ): 473x538x1228 мм

Почему пациенты выбирают MICROSON

- ✓ Высокая мощность аппарата позволяет эффективно прорабатывать зону меньшим количеством линий. Процедура становится доступной для пациента даже при максимальном количестве линий.
- ✓ Первые результаты пациент видит через 1-2 недели. Окончательный результат, стойкий лифтинг-эффект проявляется через 1,5-2 месяца.
- ✓ Уникальная запатентованная технология Coldtouch снижает риски ожогов и рубцов, а также дает быструю реабилитацию. В насадку встроен охлаждающий элемент, что уменьшает болезненные ощущения во время процедуры.

Преимущества метода

- Новая технология SMAS-лифтинга подходит для работы с любым морфотипом клиента независимо от возраста и пола, работает с телом, лицом и областью век.
- Избирательная работа с ПЖК в режиме Destruction позволяет проводить точечную работу с малярными мешками, объемными лицами, вторым подбородком, жировыми пакетами на теле.
- Благодаря избирательной работе только с белковыми структурами в режиме Saver можно не опасаться риска создания “изможденного лица” у возрастных пациентов.
- Безоперационная блефаропластика выполняется специально разработанным картриджем для облегчения доступа к анатомически сложным участкам. Работа с веками проходит с защитой пациентов с синдромом сухого глаза.
- Возможность работы специалиста по индивидуальным протоколам с каждым пациентом.

- Технология ColdTouch – обеспечивает безопасность для пациента. В центре картриджей углеводородный элемент, который не дает перегреваться проводниковой среде, что делает процедуру безопасной и комфортной.

Какой эффект получают пациенты после многоуровневой пластики лица на аппарате MICROSON?

Аппарат позволяет проводить точнейшие манипуляции и решать любой запрос пациента, который видит результат сразу после процедуры, без боли, отечности и долгой реабилитации.

Всего за одну процедуру пациент получает:

- эффект 3D-лифтинга;
- улучшение упругости кожи;
- разглаживание заломов и морщин;
- уменьшение второго подбородка;
- устранение провисания в зонах век, маляров, скул и щек;
- уменьшение склонности к отекам;
- устранение локальных жировых отложений.